

Installation Manual : Dr. Nano Mini for Dental

For G1/2

In case that waterline is connected with G1/2 pipe(1/2 inch diameter), please use optional parts for G1/2 and follow the below.
 本製品を設置する場所の規格が G1/2 の仕様となっている際は、以下のマニュアルに沿って同梱するオプションパーツをご使用ください。


JAPAN 

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <h2 style="margin: 0;">1 Dr. Nano Mini x 1</h2> </div>  </div> <p style="margin-top: 10px;">※ Important Dr. Nano has a water inlet and outlet. Please follow Waterflow Mark.</p> <p>※ ご注意 設置におきましては、本体記載の「Waterflow マーク」を確認の上、上流と下流の向きをお間違えにならないよう十分ご注意ください。</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">Optional Parts for G1/2</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">2 Socket x 1</h2>  </div> <div style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">3 Gasket with filter (replacement-free) x 1</h2>  </div> </div> <p style="margin-top: 10px;">※ These parts are for G1/2 only. For other diameters, please see our website.</p> <p>※ 記載のオプションパーツは G1/2 規格の仕様となっております。その他の規格につきましては、ブランドサイトをご確認ください。</p>
---	--


1

Choose a location to install the Dr. Nano, either on the faucet side or the unit side. A larger space is preferable. Remove the existing flexible pipe and set it back 40mm.


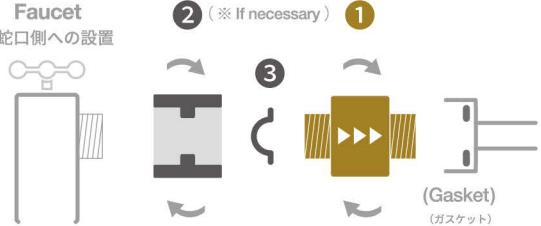

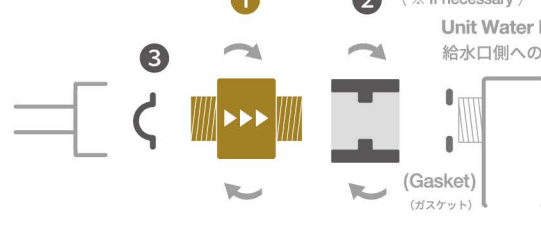

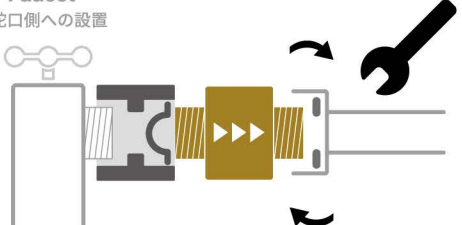

まず、Dr. Nano 設置位置をご確認ください。Dr. Nano はジャンクションボックスの『水道蛇口の先 (A)』または『給水口の手前 (B)』のどちらかに設置をします。本体サイズが40mmのため、A・Bいずれかに40mmのセットバックを確保するスペースがあるか、合わせてご確認ください。

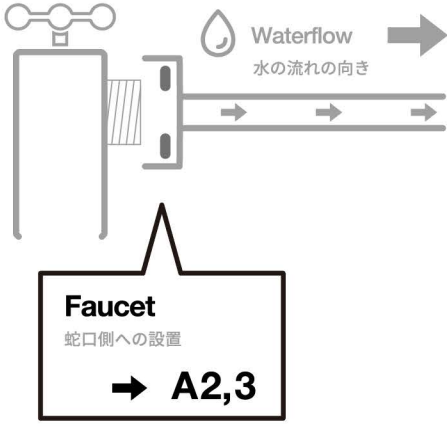

Faucet
蛇口側への設置
→ A2,3

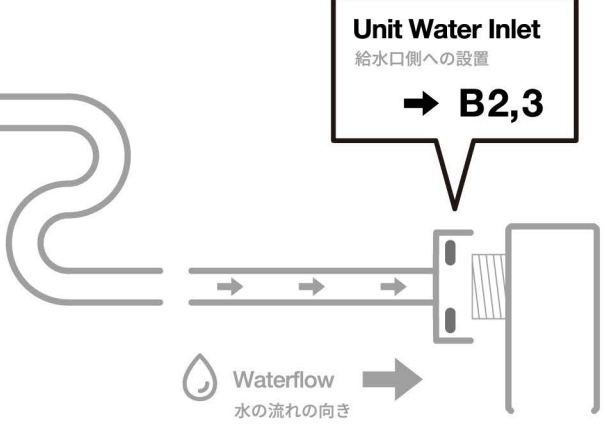

Unit Water Inlet
給水口側への設置
→ B2,3

<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">A2</div> <div style="margin-right: 10px;">  <p style="margin: 0;">Waterflow 水の流れの向き →</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">Faucet 蛇口側への設置</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">(Gasket) (ガスケット)</p> </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">B2</div> <div style="margin-right: 10px;">  <p style="margin: 0;">Waterflow 水の流れの向き →</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">Unit Water Inlet 給水口側への設置</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">(Gasket) (ガスケット)</p> </div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">A3</div> <div style="margin-right: 10px;"> <p style="font-size: small;">Faucet 蛇口側への設置</p>  </div> </div> 	<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">B3</div> <div style="margin-right: 10px;"> <p style="font-size: small;">Unit Water Inlet 給水口側への設置</p>  </div> </div> 